

شماره تماس: 021-88246307

ایمیل: kacher.animal@gmail.com

وب سایت: www.kacher.ir

چرا کچر؟

ابزار مهار و نجات حیوانات کچر دارای ویژگی های خاص فراوانی است که در زیر به بعضی از آنها اشاره می کنیم:

استفاده از مکانیزم اتوماتیک جهت رهاسازی و بازشدن حلقه بصورت سریع و آسان که از خفگی و آسیب رساندن به حیوانات جلوگیری می کند. استفاده از متریال و مواد آلومینیومی از نوع مورد استفاده در صنعت هوا و فضا که در عین سبک بودن، بسیار مقاوم در برابر خم شدگی می باشد و تحمل مهار وزن بالا را دارد. استفاده از تمام اصو ارگونومی و تعبیه دستگیره های مناسب جهت جلوگیری از رهاشدن ابزار از دست اپراتور در حین استفاده و همچنین جلوگیری از آسیب رسیدن به مچ دست افراد در حین استفاده.


کچر چیست؟

افراد و گروه های مخصوص زنده گیری و عقیم سازی حیوانات، برای مهار حیوانات بخصوص در مواردی مثل عقیم سازی و کنترل جمعیت حیوانات، از روش های غیر اصولی و خطرناکی استفاده می کنند که در بیشتر موارد موجب صدمه و آسیب جدی به افراد و حیوانات و حتی مرگ آنها می شود.

دستگاه مهار و زنده گیری حیوانات اهلی و نیمه اهلی کچر دارای مکانیزم قفل و رهاسازی اتوماتیک می باشد و طوری طراحی و ساخته شده تا بالاترین ایمنی را برای حیوانات و شخص استفاده کننده به همراه داشته باشد و از آسیب رسیدن به هر دو جلوگیری می کند. استفاده از مکانیزم اتوماتیک جهت رهاسازی و باز شدن حلقه بصورت سریع و آسان که از خفگی و آسیب رساندن به حیوانات جلوگیری می کند همچنین در این ابزار از متریال و مواد آلومینیومی از نوع مورد استفاده در صنعت هوا و فضا که در عین سبک بودن، بسیار مقاوم در برابر خم شدگی می باشد و تحمل مهار وزن بالا را دارد - تمام اصول ارگونومی و تعبیه دستگیره های مناسب جهت جلوگیری از رها شدن ابزار از دست اپراتور در حین استفاده و همچنین جلوگیری از آسیب رسیدن به مچ دست افراد در حین کار با ابزار رعایت شده.

نحوه ی کار با کچر

این ابزار به گونه ای طراحی شده است که قابلیت مهار و نجات حیوانات در شرایط سخت بدون آسیب رسیدن به حیوانات و افراد را دارا می باشد. این ابزار متشکل از یک لوله فلزی آلومینیومی سبک و بسیار مقاوم بوده که در ابتدا و انتهای آن سیستم مکانیزم قفل و رهاسازی آسان و سریع تعبیه شده است. یک سیم بکسل نرم از ابتدای لوله وارد شده و پس از عبور از مکانیزم قفل و عبور از فنر، در انتها به شکل یک حلقه وارد مکانیزم قفل انتهایی لوله شده است. در هنگام استفاده با کشیدن ماشه مکانیزم تعبیه شده در ابتدای ابزار به سمت عقب، حلقه انتهایی ابزار که محل قرار گرفتن گردن حیوانات است و از سیم بکسل بسیار نرم و روکش نرم پلاستیکی تشکیل شده است بصورت خودکار باز می گردد و گردن حیوان درون آن قرار می گیرد، سپس سر آزاد سیم که پشت مکانیزم قرار دارد به آرام توسط شخص کشیده میشود تا حلقه مقداری تنگتر شود. در این موقعیت قطعه استفاده شده در انتهای دستگاه بصورت قفل عمل کرده و به هیچ وجه با فشار و تکان خوردن حیوان باز نمی گردد و در نهایت هنگام آزادسازی حیوان می توان با کشیدن همان مکانیزم ماشه عمل آزادسازی و رهاسازی را بصورت سریع انجام داد

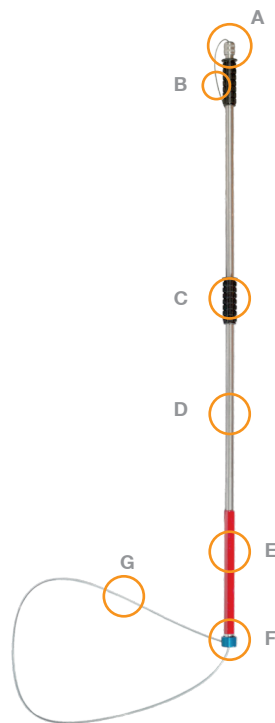

A مکانیزم قفل و رهاسازی سریع : با کشیدن و یا فشار دادن این مکانیزم، حلقه مهار دور سر حیوان به سرعت آزاد و یا قفل می شود.

B سیم مهار : این سیم پس از عبور از مکانیزم قفل و رهاسازی، در انتها به شکل یک حلقه درو گردن حیوان قرار خواهد گرفت.

C دستگیره برای جای دست می باشد تا دست شخص روی میله سر نخورد.

D محفظه میله ای دستگاه می باشد که سایر متعلقات در این میله قرار گرفته است.

E روکش نرم که از آسیب رساندن به دندان حیوانات در اثر گاز گرفتگی و یا آسیب رسیدن به میله جلوگیری می کند.

F این بخش به دلیل حرکت دواری که دارد مانع از پیچیده شدن و خفه شدن حیوان در حین تقلا و چرخیدن می شود.

D سیم بکسل نرم روکش دار که دور گردن حیوان قرار می گیرد.